


防水型押しボタン送信機 HCT-B2

緊急呼出しセット(卓上型受信機セット) ECS-B2 (T5)

緊急呼出しセット(携帯型受信機セット) ECS-B2 (KE)

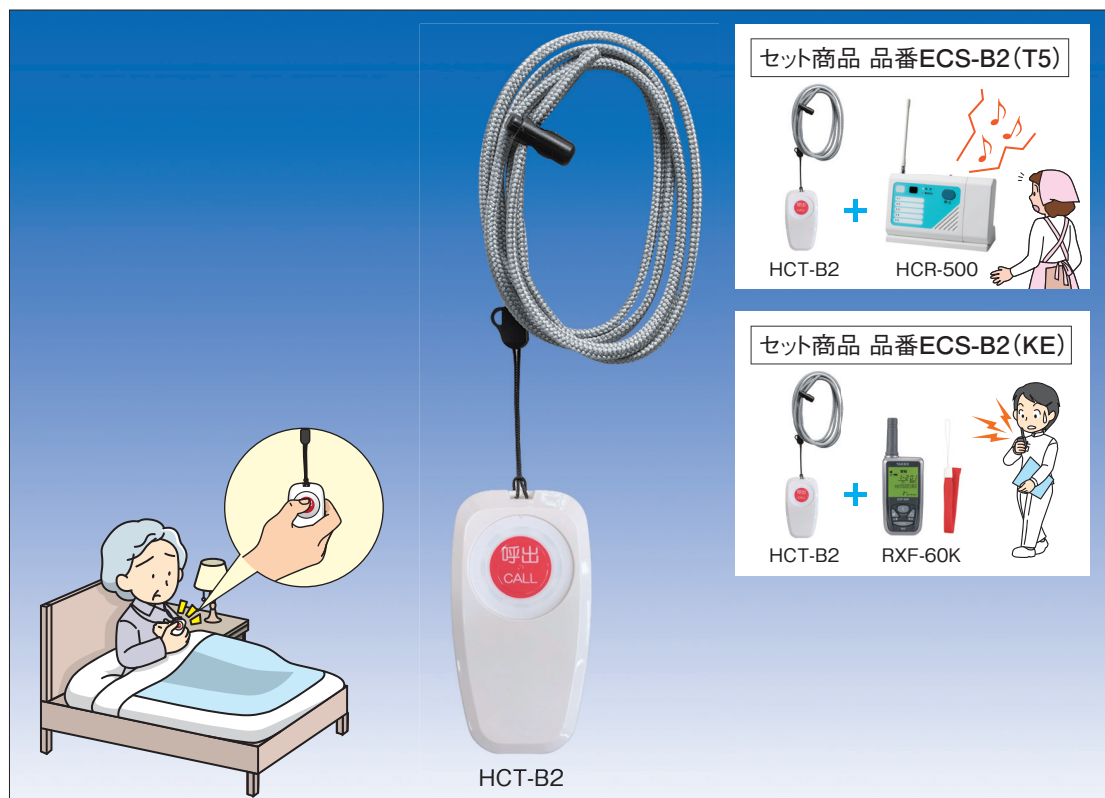

高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機！
送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました

運用

- ・送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。
- ・送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)

防水型押しボタン送信機

- ・送信機の押しボタンを押せたか？復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。
- ・卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。
- ・防水性能：IPX7相当
- ・電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)
- ・電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)

4周波切替対応型


- ・大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。
- ・送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。オプションの中継機で延長可能です。

セット商品

- 商 品 名：緊急呼出しセット (卓上型受信機セット)
 セット品番：ECS-B2 (T5)
 セット内訳：HCT-B2・HCR-500 各1台
 ※HCR-500は、卓上型でフラッシュとメロディー (合計12種＋消音) でお知らせします。
 報知時間の選択ができます。(3秒／10秒／30秒／連続)
- 商 品 名：緊急呼出しセット (携帯型受信機セット)
 セット品番：ECS-B2 (KE)
 セット内訳：HCT-B2・RXF-60K 各1台
 ※RXF-60Kは、小型軽量、充電式で専用充電器付きです。
 3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。
 報知時間の選択ができます。(20秒／2分／5分／10分)
 首掛ひもも付属しています。


防水型押しボタン送信機

運用例 〈ワイヤレス簡易型ナースコール〉

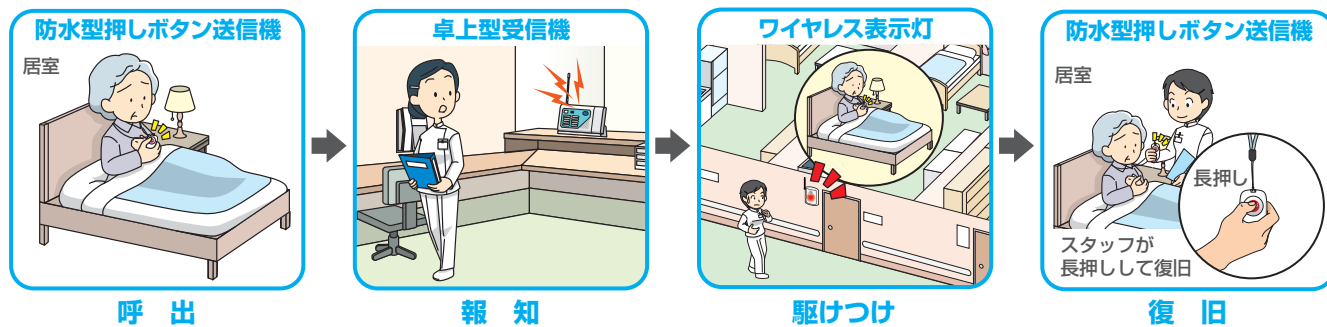


- ・HCT-B2を押すと、スタッフステーションのHCR-500（1000）や、廊下のHCR-810HYが報知動作を行います。
- ・現場でHCT-B2を復旧操作すると、HCR-500（1000）やHCR-810HYが報知動作を停止します。

使用例

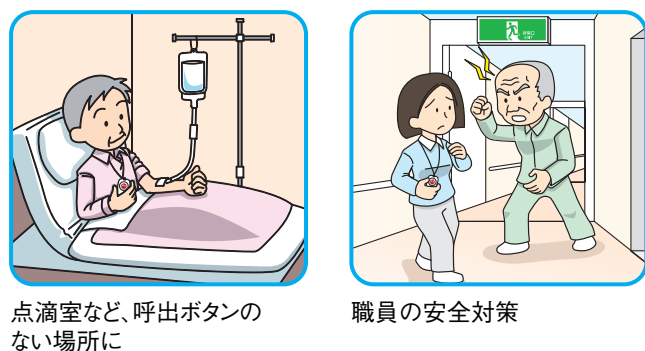


■外形寸法図（単位：mm）

● HCT-B2

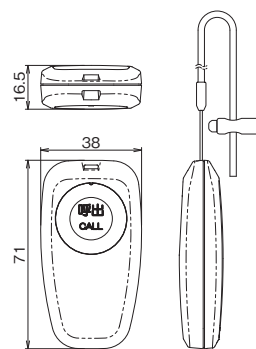


● RXF-60K

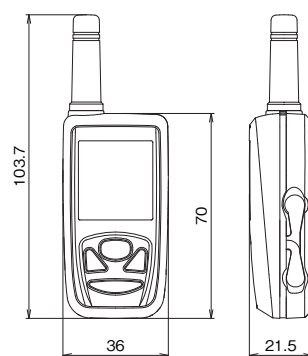

■仕様

品名	防水型押しボタン送信機（4周波切替対応型）
品番	HCT-B2
電源電圧	コイン形リチウム電池CR2032×2個（DC3V）
電池寿命	約3年（1日10回送信・常温時） 電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
送信周波数帯	426MHz帯 4波 （小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備）
送信出力	11mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約100m以内（見通し距離）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露・氷結なきこと） （0℃以下、または40℃以上では電池の機能が低下する場合があります）
防水構造	日常生活防水
付帯機能	送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能 送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能 電池切れ報知機能、定期送信機能
質量	約35g（電池、首掛ひも含む）
外観	樹脂（筐体：ホワイト、送信ボタン：赤色）

● HCR-500 卓上据置時

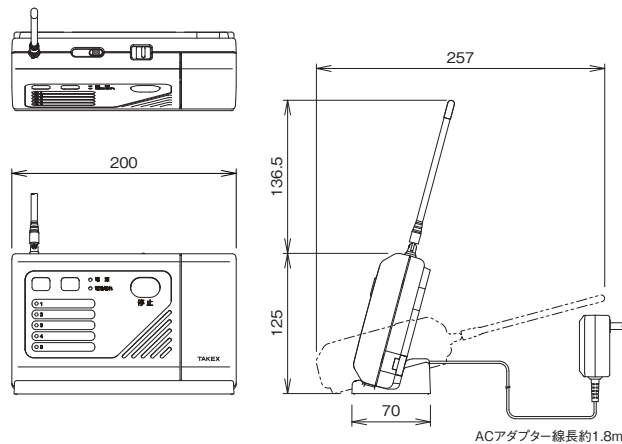

■品質保証とアフターサービス■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

ヘルスケア事業部
事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075)594-7211(代) FAX (075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■